

Nexcare™

Kit di pronto soccorso

IT

Il kit di pronto soccorso Nexcare™ contiene una serie di prodotti per il trattamento di piccole ferite. I prodotti sono confezionati in una particolare busta, piccola e leggera, che può essere portata con sé ovunque.

Per le istruzioni d'uso fare riferimento alle descrizioni di prodotto riportate sotto.

Attenzione:

Consultare un medico o un operatore sanitario nel caso di dubbi in merito al corretto trattamento di ferite o lesioni. Prodotti monouso.

Contenuto del kit:

- 4 cerotti Nexcare™ Comfort (25 mm x 72 mm)
- 5 cerotti Nexcare™ Active (19 mm x 72mm)
- 2 cerotti Nexcare™ Aqua 360° Maxi (60 mm x 89 mm)
- 2 cerotti Nexcare™ Active 360° Maxi (50 mm x 101 mm)
- 1 busta di Steri-Strip™ (6 x 6 mm x 38 mm)
- 1 busta di Steri-Strip™ (3 x 6 mm x 75 mm)
- 4 salviette detergenti
- 1 paio di guanti monouso

Cerotti Nexcare™ Comfort

4 cerotti, 25 mm x 72 mm

I cerotti Comfort sono realizzati in un materiale particolarmente morbido e flessibile che consente alla pelle di respirare. L'adesivo ipoallergenico aderisce perfettamente garantendo una rimozione semplice.

Istruzioni per l'uso:

Pulire e lasciare asciugare accuratamente la ferita. Applicare con attenzione il cerotto senza tensione.



Cerotti Nexcare™ Active

5 cerotti, 19 mm x 72 mm

I cerotti Active, particolarmente flessibili, sono realizzati in una speciale schiuma, sono in grado di aderire anche su pelli umide o sudate, non si attaccano alla ferita e sono di semplice rimozione.

Istruzioni per l'uso:

Pulire e lasciare asciugare accuratamente la ferita. Applicare con attenzione il cerotto senza tensione.




Cerotti Nexcare™ Aqua 360° Maxi

2 cerotti, 60 mm x 89 mm

Cerotti grandi, ideali per ginocchia e gomiti.

I cerotti Aqua sono costituiti da una sottile pellicola, traspirante e ipoallergenica. Sono impermeabili al 100% e sono in grado di rimanere adesivi anche durante la doccia, il nuoto o l'esercizio fisico. Ideali per la protezione di tagli, abrasioni e di piccole ferite.

 La confezione di ogni singolo cerotto contiene lattice di gomma naturale che può causare reazioni allergiche.

Istruzioni per l'uso:

Pulire accuratamente la ferita
Aprire l'involucro
Staccare il cerotto dall'involucro afferrando la linguetta. Applicare sulla ferita ed esercitare pressione.
Staccare la cornice di carta. Far aderire il cerotto con attenzione.
Rimozione: sollevare il bordo con delicatezza e togliere il cerotto tirandolo parallelamente alla pelle.

STERILE R



Cerotti Nexcare™ Active 360° Maxi

2 cerotti, 50 mm x 101 mm

I cerotti Active, particolarmente flessibili, sono realizzati in una speciale schiuma; sono in grado di aderire anche su pelli umide o sudate, non si attaccano alla ferita e sono di semplice rimozione. Con adesivo intorno al tampone per aiutare a proteggere la ferita.

Istruzioni per l'uso:

Pulire e lasciare asciugare accuratamente la ferita. Applicare con attenzione il cerotto senza tensione.

STERILE R



Suture cutanee adesive per piccole ferite 3M™ Steri-Strip™

1 busta, 6 mm x 38 mm, 1 busta, 6 mm x 75 mm

Istruzioni per l'uso:

Pulire e asciugare la cute almeno 5 cm intorno alla ferita. Aprire la confezione, estrarre il supporto di carta con le strisce di sutura, strappare con delicatezza una delle due linguette di carta all'estremità, lungo la linea tratteggiata.
Avvicinare i lembi della pelle.
Iniziando dal punto centrale della ferita, applicare la prima metà della striscia fino al margine della ferita premendo fermamente. Di seguito, senza esercitare tensione, far aderire l'altra metà della striscia.

Applicare le altre strisce ad una distanza minima di 3mm l'una dall'altra per agevolare l'eventuale drenaggio dell'essudato.

Se necessario applicare una medicazione sopra la ferita suturata, ad esempio il cerotto Nexcare™ Aqua Maxi contenuto nel kit di pronto soccorso.

STERILE R



Salviette detergenti

4 salviette per la detersione di piccole ferite.

Prodotte da:
AKLA AB
Box 534, 182 15 Danderyd, Svezia



Guanti

1 paio di guanti in lattice

 Il prodotto contiene lattice di gomma naturale e può causare reazioni allergiche.

Prodotto da:
TG Medical Sdn
Sdn. Bhd. 41050 Klang, Selangor D.E. Malesia

